

## 男性用 装着式集尿器 「ダンディユリナー」について

### 1. 「ダンディユリナー」開発の経緯

ある日突然、おむつ生活を強いられた74歳の男性自身が考案。  
羞恥心や屈辱感、絶望感など複雑な感情とおむつの気持ち悪さ、ゴミの多さに悩まされ、なんとかしておむつを外したいと思い、マヨネーズチューブを加工して自作。




### 2. 使用用途

寝た姿勢（臥位・側臥位）で排尿できる  
装着型の採尿器（集尿器）



ダンディユリナーは装着式の  
男性用集尿器です。

臥位(仰向き/横向き)で使用可。  
うつ伏せは不可。

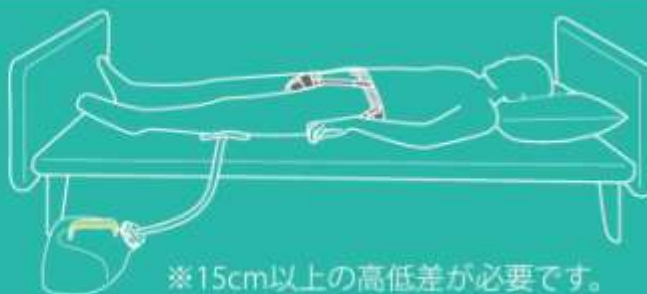

※15cm以上の高低差が必要です。


### 3. 使い方

- ①寝た姿勢（臥位または側臥位）で使用
- ②レシーバー（採尿器）をペニスに挿入し、  
専用のガーターで固定する



### 4. 製品の特徴

- ①ペニス（肌）に優しいシリコン製のレシーバー  
コンドーム式に比べて蒸れが少ない、強い締め付けが  
無い、排尿感がよい
- ②レシーバーは軽量、ソフトで肌触りがよく装着感は  
あまり気にならない
- ③洗いやすく衛生的

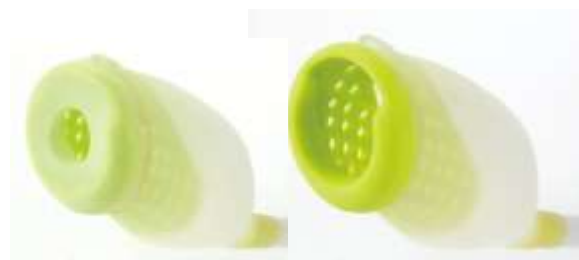

- ④装着しやすく、レシーバーがずれにくい専用の固定  
ガーターが標準装備されている
- ⑤蓄尿タンクの容量が2,800mlあるので、夜間多尿・  
夜間頻尿の人も安心できる

## 5. 適応する方

- ①寝た姿勢で排尿する方、せざるをえない方
- ②おむつやコンドーム式の代わりに
- ③排尿の都度介助が必要な方(特に夜間)
- ④頻尿、尿失禁などで何度もトイレに行くのがつらい方



## 6. 適応しない方

- ①尿器を勝手に外してしまう方
- ②体動が極端に激しく尿器が外れてしまう方



## 7. 注意事項

- ①ラテックスアレルギーがある方は  
逆流防止膜を使用できない
- ②15cm以上の高低差が必要(ベッド可)
- ③長時間装着する方は1日に1回以上、肌を微温水で  
清拭、乾燥してスキンケアする
- ④尿失禁で使用する人は、膀胱内の残尿量をチェック  
しておく

## 6. 製品仕様と材質

### <セット内容>

本体、専用ガーター、逆流防止膜  
洗浄ブラシ、吸水シート

### <材質>

- ・内レシーバー：医療用シリコン
- ・外レシーバー：医療用シリコン
- ・導尿チューブ：塩化ビニール(内径9mm)
- ・蓄尿タンク(2,800ml)：ポリエチレン
- ・逆流防止膜：ラテックス



## 7. 用具の解説

ダンディユリナーという集尿器は、ペニスのスキントラブルや尿もれの心配を少なくして装着使用する。本人が気持ちよく着けていられる機能を多様に配慮した。ソフトシリコンで成型された内レシーバーの内径部は凹凸に小さな穴を配慮して通気性を持たせてムレを防止している。ペニスを挿入する口は一旦挿入したペニスが飛び出しにくく、さらに入り口付近の尿を漏らさない折り返し構造になっている。体動が少ない人はこの内レシーバーを装着して排尿できる。体動が多い人のためには薄いラテックス膜で作られた逆流防止弁を使用して尿もれを防止する構成になっている。

装着式集尿器ではレシーバーを陰部に固定して尿もれを防ぐことが大切である。そのためレシーバーの出口が持ち上がって逆流しないようにベルトで調節する専用ガーターを標準装備している。

また、蓄尿タンク容量は2.800mlあるので夜間多尿の方も安心できる。また、蓄尿タンクに尿が落下する音を消す工夫がしてあるため、静かに排尿できる。

## 8. その他

日常生活用具給付 対商品（収尿器）

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html>

詳しくは市区町村の障害福祉課へお問い合わせください

## 9. 本品のお問い合わせ先

朝日産業株式会社 医療機器事業部

愛知県名古屋市中熱田区四番一丁目11番22号

TEL：052-684-6829

メール：[medical@asahi-sg.co.jp](mailto:medical@asahi-sg.co.jp)

お気軽にお問い合わせください

以上